

## Cycler « HOME CHOICE » BAXTER

Mettre la carte du patient (puce vers l'extérieur) avant d'allumer.

**Mettre l'interrupteur en position „MARCHE“**

Valider le traitement avec 

Tous les items qui clignotent doivent être validés avec 

**jusqu'à l'indication „vert pour démarrer“**

**appuyer sur la touche verte **

**Préparer et contrôler les poches de dialysat (casser les cônes)**



*appuyer*

INSTALLER LES LIGNES

**1 – Introduire la cassette – placer le présentoir**

**2 – Fermer TOUS les clamps (6 ou 10)**

**3 – Installer la ligne de drainage**



*appuyer*

TEST AUTOMATIQUE.....

CONNECTER LES POUCHES

## **METTRE LE MASQUE/ DESINFECTER LES MAINS**

**Connecter toutes les poches et casser les canules**

**Ouvrir les clamps connectés à des poches et celui de la ligne patient**



*appuyer*

AMORÇAGE

**1– Attendre l'indication**

**„CONNECTEZ-VOUS S.V.P./CONTRÔLEZ LIGNE PATIENT“**

**- mettre un masque, préparer la coquille bétadinée**

**2 – SE DESINFECTER LES MAINS**

**3 – Connecter la ligne de patient au cathéter et ouvrir le clamp intégré**



*appuyer*

DRAINAGE INITIAL

## **.....LE TRAITEMENT COMMENCE.....**

*Lignes de branchement:*

**CAPUCHON BLEU** – ligne patient

**CLAMPS BLANCS** – lignes poches


**CLAMP ROUGE** – ligne réchauffeur

**CLAMP BLEU** – ligne dernière injection

**CLAMP BLANC** sur Y – ligne de drainage

## « HOME CHOICE » BAXTER

FIN DU TRAITEMENT

 appuyer

DRAINAGE INITIAL

- inscrire la valeur sur le cahier de suivi

 appuyer

UF TOTALE (ou UF préc)

- inscrire la valeur sur le cahier de suivi

 appuyer

TEMPS MOYEN DE STASE

- inscrire la valeur sur le cahier de suivi

 appuyer

TEMPS PERDU

- inscrire la valeur sur le cahier de suivi

 retour avec

FIN DU TRAITEMENT

 appuyer

FERMER LES CLAMPS

**FERMER TOUS LES CLAMPS (1. extension de cathéter  
2. ligne patient - 3. les autres clamps)**

 appuyer

DECONNECTEZ VOUS S.V.P

**Mettre un masque – ouvrir l’emballage du bouchon bétadiné**  
**SE DESINFECTER LES MAINS**  
**Déconnecter l’extension de cathéter**  
**Retirer la cassette**

 appuyer

ETEINDRE LE CYCLEUR

*C’est en suivant cette procédure que les résultats s’enregistrent sur la puce de la carte,*












## Home Choice Arrêt prématuré du traitement



Dans tous les cas, notre but est que le patient et son conjoint passent une bonne nuit !

Donc, si pas de solution immédiate, pas de panique...

Qu'il se déconnecte, et on réfléchira...demain !

Actions	Messages sur l'écran	Commentaires
Eteindre l'HomeChoice		Interrupteur derrière la machine
Le rallumer	Veillez attendre.... Secteur rétabli	L'alarme retentit
 appuyer sur la touche rouge		
appuyer 	Volume infusé : 60 ml	Cas où l'arrêt se fait pendant l'infusion
appuyer 	Stase restante : 0h45	Cas où l'arrêt se fait pendant la stase
appuyer 	Volume drainé : 60 ml	Cas où l'arrêt se fait pendant le drainage
appuyer 	Drainage initial: 100 ml	Noter ce chiffre
appuyer 	UF totale : 200 ml	Noter ce chiffre
appuyer 	Tps de stase moyen :1h	
appuyer 	Terminez traitement	
appuyer 	Fermer les clamps	
Fermer le cathéter du patient, masque, désinfection des mains, mettre le bouchon bétadiné au cathéter	Déconnectez-vous,SVP	
 appuyer sur la touche verte		
 appuyer sur la touche rouge	Eteindre le cycler	