



Vérifier l'intégrité des poches, la date de péremption.

Il ne doit pas y avoir d'humidité à l'intérieur du premier emballage.

Ouvrir les compartiments A ou B ou A et B.


Installer les poches sur le statif ou en bas du chariot.

Prévoir un raccord jaune si plus d'un extraneal ou nutrineal.

Choisir un set de tubulures de 3 ou 5 lignes bleues selon le nombre de poches. Préparer 1 ou 2 poches de drainage, ou une longue ligne qui va directement aux WC.

1. Brancher la machine. La Serena possède également une batterie d'une autonomie de : 45 mn
2. Insérer la carte du patient.
3. Bouton vert : pour allumer, appui long jusqu'à l'alarme sonore.
4. Soulever le levier qui est à droite en maintenant le couvercle avec l'autre main sinon il s'ouvre brutalement.
5. Le programme du patient s'affiche, le vérifier.
6. appuyer « retour » sur l'écran
7. On arrive sur la page « montage »
8. Sortir le set de tubulures : le sac est double (une cavité pour le liquide propre et une cavité pour le liquide drainé)
9. Ouvrir le clapet gris qui est devant à gauche et poser les lignes dans l'organiseur.
10. Insérer ce double sac sans le déplier dans la loge en dessous du couvercle ouvert. Détacher les petits scotchs.
11. Mettre la tige rigide du sac dans les 2 loges de chaque côté. Enlever les petits scotchs.
12. Fermer le clapet gris



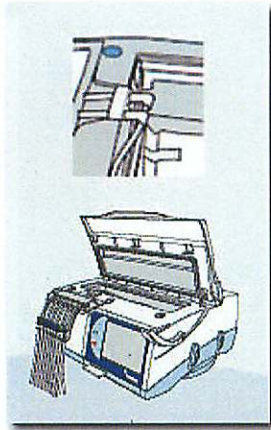

Vérifier que les lignes intérieures ne soit pas coincées.

13. Fermer le couvercle à 2 mains, et remettre le levier en position haute
14. Fermer tous les clamps des tubulures, il y en a 7 ou 10.
15. Masque, désinfection des mains.
16. Connecter les poches qui se trouvent toutes en bas du chariot ou sur le statif avec **les lignes aux clamps bleus**.
17. **La ligne au clamp vert c'est le patient**, c'est la seule ligne qui est double puisque reliée au double sac
18. **La ligne au clamp rouge, c'est le dernier sac**, souvent l'extraneal, donc si toutes les poches sont pareilles, utiliser uniquement les lignes à clamp bleu. La 2<sup>ème</sup> ligne rouge peut servir pour un premier sac (rare, c'est la poche en option)
19. **La ligne au clamp jaune** = le drainage, mettre le sac de drainage de 15 litres ou l'extension vers les toilettes.
20. Presser « montage confirmé »
21. ouvrir tous les clamps nécessaires (reliés aux poches + le drainage + le clamp patient)
22. Presser « début » pour purger : 11 mn
23. Quand purge est accomplie, fermer le clamp vert, le patient se connecte, ouvrir le clamp vert.  
Si le patient veut se connecter plus tard laisser fermé le clamp vert et on attend sur cette page.
24. Quand patient connecté, ouvrir le clamp du cathéter et presser « début »



25. Ecran « nuit » si le patient ne veut pas de lumière. toucher l'écran  
n'importe où pour rallumer
26. Laisser 2 bouchons à proximité pour le lendemain matin.

### **Débranchement.**

- \* Traitement terminé s'affiche
- \* Fermer le clamp vert et fermer le clamp du cathéter
- \* Masque, désinfection des mains
- \* Déconnexion du patient. Mettre un bouchon.
- \* Presser le bouton vert
- \* Le circuit se vide automatiquement
- \* Presser « I+ » information pour voir l'UF .Noter les chiffres dans le carnet du patient ou sur la feuille de bilan. La carte va aussi enregistrer les paramètres de la nuit.
- \* Retirer les lignes
- \* Eteindre l'appareil.

### **Débranchement provisoire :**

Quand un patient veut se débrancher provisoirement pendant le traitement .

- Choisir le moment de la stase, c'est toujours inscrit sur l'écran
- Mettre un bouchon en suivant les règles d'hygiène sur le cathéter
- Mettre un bouchon spécial pour le côté tubulure
- Regarder le temps qu'on a avant le prochain échange prévu par la machine

### **Déplacement de la machine :**

Si on veut bouger la machine de place pendant le traitement : faire « stop » bouton rouge et reprendre ensuite avec le bouton vert.

### **Débranchement Prématuré, définitif et arrêt :**

Si on veut stopper définitivement la machine en cours de traitement, si on ne trouve pas le problème qui met la machine en alarme :

- Stop : appui long
- Menu
- Arrêter
- Avec ou sans drainage : choisir sans drainage de préférence.
- Déconnecter le patient et mettre un bouchon selon les règles d'hygiène
- Retirer les lignes
- Eteindre le cycler

Prévenir les infirmières de dialyse péritonéale dès le lendemain matin