

Toutes les poches « Gambro »


1. Les différentes solutions :

Les poches sont toutes en 3 compartiments :

AC = solution isotonique à 1,5%

BC = solution intermédiaire à 2,5%

ABC = solution hypertonique à 3,9%

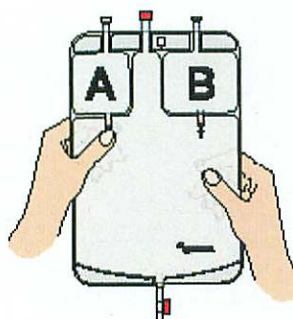

Only A : 1,5% glucose.

Gambrosol trio 10 : Ca 1,75

Gambrosol trio 40 : Ca 1,35 (standard)

Toutes les poches sont biocompatibles avec
un Ph = 6,5

2. Les volumes :

2 litres et 2,5 litres pour le manuel

2,5 litres et 5 litres pour la machine

3. Les logos

pas de logo de couleur :

4. **Extraneal et Nutrineal**: solutions « BAXTER » qui peuvent être utilisées avec le système « Gambro » : Attention,

Il faut utiliser **un raccord spécial jaune**

Les poches pour la machine Séréna sont aussi à 3 compartiments.
Pour l'Extraneal ou le Nutrineal il y a un petit raccord spécial déjà intégré à la tubulure.