

## **EVODIAL – Procédure d'utilisation**

---

- Filtre semblable au Néphral dont la membrane est déjà héparinée.
- Filtre à membrane AN69 ST dont la face interne contient de l'héparine.
- Le rinçage du filtre peut s'effectuer « on line ».
- L'amorçage doit être réalisé avec une pompe à sang à 150ml/min. minimum.
- S'assurer que la chambre d'expansion artérielle soit remplie.
- Dégazage important : éliminer un maximum d'air dès le début de l'amorçage.

**Si le début du traitement est retardé de 20 minutes ou plus, après le rinçage de l'hémodialyseur, il est recommandé d'effectuer un nouveau rinçage avec au moins 250ml avant de brancher le patient.**

M.-G. Droulez, IRUS

Dès le 15 septembre 2009, les filtres Evodial remplaceront les Néphral

- Néphral 400 = Evodial 1.6
- Néphral 500 = Evodial 2.2

•Lkrl

1213 petit%ll

2222+2, LL.»?àLo

clm1

clm1