

## OSMOSEURS - MODE D'EMPLOI

- Brancher l'arrivée d'eau (tuyau blanc).
- Brancher l'évacuation (tuyau rouge avec crosse métallique).
- Brancher la prise de courant.
- Oter le capuchon blanc des tuyaux bleus.
- Connecter la machine à l'osmoseur (tuyaux bleus).
- Sur l'écran de l'osmoseur : Stand by.

- Presser la 1<sup>ère</sup> touche à gauche




dialyse

- Vous pouvez demander la dialyse.

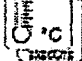
### A la fin de la dialyse :

- Déconnecter la machine
- Débrancher l'arrivée d'eau
- Débrancher l'évacuation d'eau.
- Débrancher la prise de courant.

### Au 8<sup>o</sup> :

- Rebrancher l'eau
- Rebrancher l'évacuation d'eau
- Rebrancher la prise de courant.
- Remettre le capuchon sur l'embout métallique des tuyaux bleus.
- Presser sur le 3<sup>o</sup> bouton sur la gauche  à 5 reprises pour contrôler
- le temps restant avant la prochaine stérilisation obligatoire.

### Si nécessaire :

- Presser sur la 2<sup>o</sup> touche sur la gauche 
- Pour demander la stérilisation.
- A la demande «*please inject citric acid*»
- Ouvrir le bouchon bleu sur le dessus de l'appareil
- Casser et ôter l'embout du tuyau de la poche d'acide citrique.
- Insérer le tuyau dans le grand trou
- Vider le contenu en pressant la poche.
- Enlever la poche vide.
- Revisser immédiatement le bouchon.
- Si nécessité d'utilisation : la dialyse est possible durant la période de rinçage en appuyant sur la touche



Prof. Pierre-Yves Martin  
Médecin chef

Marie-Geneviève Droulez  
IRUS